

## 特徴

### NCアライナー

近年急速に進化しているCAD/CAM技術を応用し、歯科医師の治療計画、指示の下、専任の歯科技工士がコンピュータで歯をシミュレーションで移動して作るマウスピース型の矯正装置です。治療後の歯並びや治療にかかるおおよその期間、必要となるアライナー数などを予測することができます。アライナーを複数回一度にお渡しできるため患者様に来院していただく頻度を軽減できます。



ちなみに、従来からあるクリアアライナーは患者様の歯型から作った模型をもとに、専任の歯科技工士がハンドメイドで作るマウスピース型矯正装置です。基本的に毎月新しい歯型をとって、その都度アライナーを作ってお渡しします。



自然に見えるって  
イイよね!

## 矯正治療の流れ

一般的に矯正治療は患者様のお気持ちを踏まえ、現状の確認を行うため様々な検査を行います。そのうえで治療計画を立て、適切と思われる治療法や装置が選択されます。(カウンセリングや診査診断の結果、アライナー以外の装置が望ましい場合もあります。)

### 1. 問診 / カウンセリング

患者様の具体的な希望や当院での治療方針、必要な費用などについてご説明をいたします。



### 2. 検査

治療開始前には検査をおこないます。歯型やレントゲンのほか、お顔やお口の写真を撮ります。



### 3. 治療

治療計画をご説明し、患者様の同意をもって実際の矯正治療に入ります。



### 4. 保定・定期検診

歯並びが整った後、後戻りしないように保定装置を使用します。



詳しくは当院までお気軽にご相談ください。

HTTP:// [www.labowada.co.jp/](http://www.labowada.co.jp/)

和田精密

検索 🔍

ライフスタイルに合わせて気になる部分の歯並び改善

ゴールが見えるマウスピース矯正  
エヌシー・アライナー  
**NC Aligner**

## マウスピース矯正って何？

薄く透明な歯科用樹脂で作られた、アライナーと呼ばれるマウスピースを毎日使用して歯並びを徐々に整える矯正治療です。

このアライナーを定期的に新しいものに交換し、前歯の凸凹やすき間を目立たず少しずつ整えていきます。

ご自身で着脱できるので、普段どおりに食事や歯磨きができます。また、薄い材質なので装着中の違和感が少ないです。



## 使うときの注意は？

### ★しっかり使いましょう

アライナーはご自身で着脱できる手軽さがありますが、使用しなければ歯は全く動きません。食事と歯磨きするとき以外はできるだけ連続して使用してください。使用時間が長いほど効果が上がります。1日20時間以上が目標です。

### ★とりあつかいは優しく、紛失注意

透明で薄い樹脂なので雑に着脱したり、不適切な位置で噛むと変形してしまいます。また、熱いお湯(50℃以上)でも変形するため、お手入れは水を使って丁寧に行ってください。透明で目立ちにくい装置ですので、紛失しないよう外した時はケースに保管してください。


### ★歯磨きはしっかりとしましょう

アライナーが長時間、歯を覆うため歯に食べかす等が残っているとむし歯になるリスクが高まります。装置を使用する前は、特に口の中のクリーニングを心がけましょう。



アライナーの着脱と装着したところ

## アライナー治療の流れ

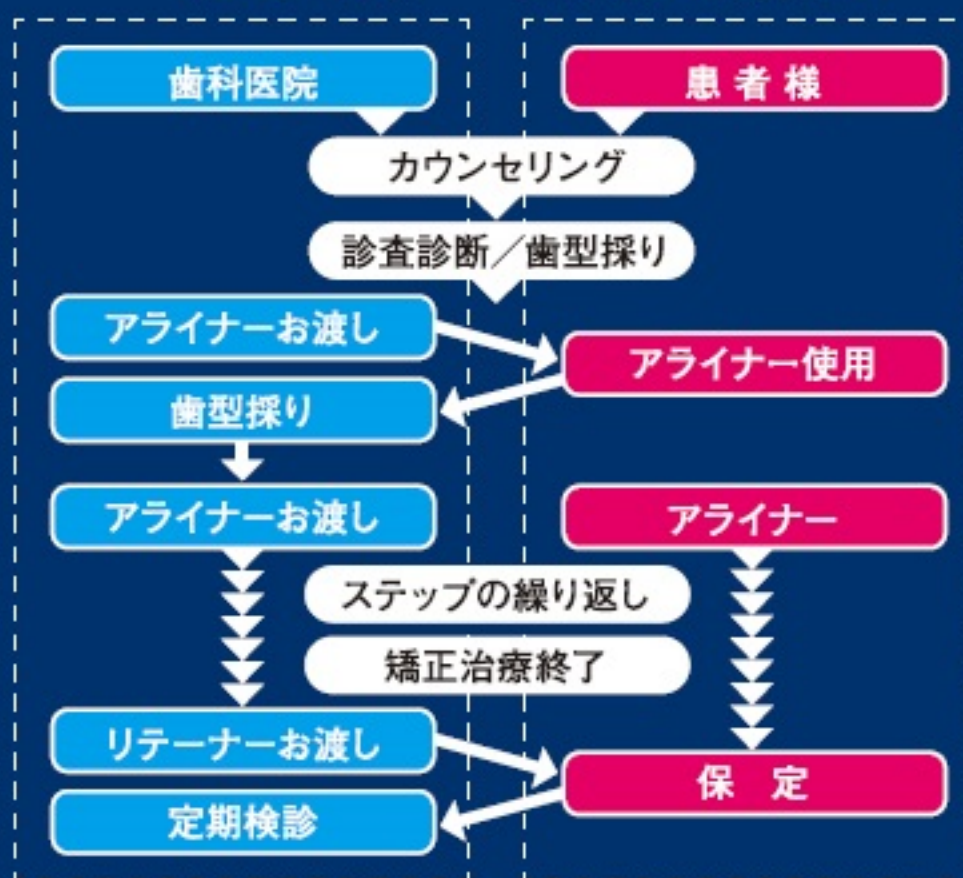

実際の治療例

## FAQ よくある質問

### Q1.年齢制限はありますか？

A1.制限はありません。ただし症例によってはアライナーだけの改善が難しい場合があります。詳しくは担当医にご相談下さい。

### Q2.子供にも使えますか？

A2.基本的には使えますが装置を自分で管理できないと効果を期待することは難しくなります。お子様の性格などを踏まえ、担当医にご相談ください。

### Q3.むし歯があったらどうするの？

A3.虫歯の治療が終わってからの治療となります。途中でむし歯が見つかった場合には、アライナーはお休みすることもあります。治療が終わったら再開可能です。

### Q4.痛くありませんか？

A4.新しいアライナーをはめた時に違和感や痛みを感じる場合があります(個人差があります)が、ほとんどの場合、数日たつと収まってきます。痛みが極端に強い場合はすぐに主治医にご相談ください。

### Q5.治療期間はどれくらいですか？

A5.歯ならびの状態にもより異なりますが、数ヶ月以上かかることが一般的です。

### Q6.アライナーは壊れませんか？

A6.丁寧に使用すればすぐに壊れてしまうようなことはありませんが、同じアライナーを長く使用すると、部分的に破れたり、穴が空いてくる場合があります。

### Q7.手入れはどうするの？

A7.水洗いだけで構いませんが、汚れや臭いが気になる場合は義歯洗浄剤などをお使い下さい。熱湯に触れると変形しますのでご注意ください。

### Q8.痛いのでしょうか？

A8.個人差がありますが、つけ始めはきつめの靴をはくような感じです。治療が進むにつれて徐々に違和感は少なくなっていきます。

### Q9.医療費控除は受けられますか？

A9.美容目的や審美目的を除き、機能改善のための治療であれば控除の対象となる場合があります。